



# TARJETA ALCOHOL

## PRUEBA RÁPIDA PARA DETECCIÓN DE DROGAS

Registro Sanitario No. 0269R2017 SSA



D-Check® Tarjeta es un inmunoensayo cromatográfico rápido conformado por tiras reactivas múltiples para la detección cualitativa y simultánea de una a catorce drogas y adulterantes en una variedad de combinaciones en orina humana.

El Ritalin - MPD (nombre comercial de la droga **metilfenidato**) es un estimulante del sistema nervioso cuyos efectos son similares a los de la cafeína, aunque de mayor potencia.

El **alcohol** es una droga que hace más lenta la actividad cerebral. Puede cambiar el estado de ánimo, comportamiento y autocontrol, afectando al adecuado desempeño de las tareas y provocar accidentes.

### CADENA DE CUSTODIA

El proceso que va desde la toma de la muestra que se analizará hasta la entrega de los resultados se denomina "cadena de custodia". El proceso inicia cuando la persona es nominada al examen y continúa con la orden médica, llena una ficha donde expresa su consentimiento para continuar con la toma de la muestra de orina. Una vez tomada, se vuelve a sellar en presencia de la persona. De ahí se va al laboratorio. Los resultados se comunican al médico que emitió la orden o al responsable de la política preventiva en la empresa.

#### Sello de seguridad

Etiqueta autoadherible que se coloca en la prueba para evitar manipulaciones.

#### Bolsa de seguridad


Bolsa especial para el traslado de muestras positivas al laboratorio para confirmación de presunto positivo.

#### Confirmación de positivo

Estudio por el cual se confirma el positivo de la muestra en nuestro laboratorio, certificado el resultado.



### MODO DE USO

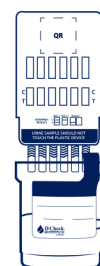

Otras tiras



\*Tira de alcohol

- 1 Recoja la muestra en el vaso especial y sumerja las tiras en la orina.
- 2 Coloque la cubierta protectora sobre las tiras expuestas y ponga el dispositivo sobre una superficie limpia y plana.
- 3 Interprete los resultados en 2 minutos para la tira de alcohol y 5 minutos para el resto. No interprete los resultados después de este tiempo.

### INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Tira de alcohol			Otras tiras		
POS (+)	NEG (-)	INVÁLIDO	NEG (-)	POS (+)	INVÁLIDO



www.dcheck.com.mx  
SOLO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD